

Organschneidetisch

Typ: OST 10/1030
OST 10/4050

Bedienungs- und Montageanleitung

Inhalt

1 Allgemeiner Betrieb	3
2 Besonderheiten der Organschneidetische	3
3 Pflegehinweise für Edelstahloberflächen	3
3.1 Allgemeine Pflegeanweisungen für Edelstahl	3
3.2 Erstreinigung / Reinigung / vorbeugende Maßnahmen.....	3
3.3 Reinigungsmittel / Reinigungshilfsmittel.....	4
3.3.1 Edelstahlpflege / Edelstahlreiniger.....	4
3.3.2 Geeignete Reinigungsmittel	4
3.3.3 Entkalken	4
3.3.4 Bürsten / Schleifvlies.....	4
3.3.5 Textilien	5
4 Konformitätserklärung	6

Bedienungs- und Montageanleitung

1 Allgemeiner Betrieb

Der Organschneidetisch ist absolut wartungsfrei. Die Wartung beschränkt sich auf den folgenden Punkt:

- Regelmäßige Reinigung des kompletten Tisches

Eine anderweitige Benutzung des Organschneidetisches ist nicht zulässig. Bei Verstoß erlöschen die Betriebserlaubnis sowie jeglicher Gewährleistungsanspruch.

2 Besonderheiten der Organschneidetische

- Die Organschneidetische sind verschiebbar
- Die PE Platte und das perforierte Blech sind abnehmbar
- Das Auslaufrohr ist höhenverstellbar
- Das PE Ablageboard unterhalb der oberen Ablage ist ebenfalls herausnehmbar

3 Pflegehinweise für Edelstahloberflächen

3.1 Allgemeine Pflegeanweisung für Edelstahl

Die besten Nachrichten rund um die Reinigung und Pflege von Edelstahl sind die, dass Edelstahl nur sehr wenig Pflege benötigt und Verunreinigungen meist einfach zu entfernen sind.

3.2 Erstreinigung / Reinigung / vorbeugende Maßnahmen

Nach dem Einbau und/oder der Montage von Geräten bzw. Möbeln aus Edelstahl muss eine Erstreinigung durchgeführt werden, damit eventuelle Verschmutzungen durch Lagerung, Transport oder Montagerückstände entfernt werden.

Schutzfolien oder Verpackungen aus Papier bzw. Rückstände von Haftklebern müssen nach Aufbau der Montage vollständig entfernt werden, da sie zur Korrosion führen können. Zur Reinigung dürfen nur geeignete Reinigungsmittel (siehe unten) verwendet werden. In der Regel wird das entsprechende Reinigungsmittel mit einem Mikrofasertuch auf der Oberfläche gleichmäßig verteilt. Hartnäckige Verschmutzungen werden intensiver bearbeitet, z. B. mit einem weichen Kunststoffvlies.

Danach werden Reinigungsrückstände mit klarem Wasser abgespült bzw. abgewaschen und die Flächen mit weichen Tüchern abgetrocknet.

Schwerlösliche Rückstände oder kleine Kratzer können mit einem geeigneten Nylon-Schleifvlies weggearbeitet werden.

Bedienungs- und Montageanleitung

3.3 Reinigungsmittel / Reinigungshilfsmittel

Diese können unter der Beachtung der Anwendungshinweise des jeweiligen Reinigungsmittelherstellers verwendet werden.

3.3.1 Edelstahlpflege / Edelstahlreiniger

Edelstahl Pflegemittel – Spezialpflege- und Schutzmittel für Edelstahl. 400 ml Spraydose.
Artikel Nr.: 060.010.001

Vor dem Gebrauch Spraydose kräftig schütteln, aus ca. 25 cm Entfernung aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einem weichen, trockenen Tuch gründlich abwischen. Anschließend gegebenenfalls sterilisieren/desinfizieren.

3.3.2 Geeignete Reinigungsmittel

Edelstahl-Teile sollten grundsätzlich nur mit basischen Reinigungsmitteln behandelt werden.

Das Reinigungsmittel muss auf jeden Fall frei von Salzsäure und chlorhaltigen Mitteln, etc. sein, was zu Verfärbungen führen kann.

3.3.3 Entkalken

Hierfür handelsübliche, für Edelstahl geeignete Entkalkungsmittel verwenden.

3.3.4 Bürsten / Schleifvlies

Bürsten mit Natur-, Kunststoffborsten.

Artikel	Artikel Nr.	Körnung	Maße
Nylon-Schleifvlies fein	060.010.002	P 1000	L x B: 200 x 115mm
Nylon-Schleifvlies grob	060.010.003	P 280	L x B: 200 x 115mm

Anwendungshinweise:

Zu beachten, sofern es sich um eine geschliffene Oberfläche handelt:

Immer in Richtung des bereits vorhandenen Schleifbildes arbeiten, nie quer dazu.

Bedienungs- und Montageanleitung

3.3.5 Textilien

Textilmaterial aus Natur- und Chemiefasern.

Sehr gut geeignet sind Reinigungstextilien aus Mikrofasern, um Griffspuren von Edelstahloberflächen zu entfernen.

Artikel	Artikel Nr.	Material	Maße
Mikrofasertuch	060.010.005	80% Polyester 20% Polyamide	L x B: 400 x 400 mm



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY

Wir KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Straße 2A
93049 Regensburg

erklären in alleiniger Verantwortung, das Produkt:

Geräteart: Organschneidetische

Typenbezeichnung: OST 10/1030, OST 10/4050

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der/den folgenden Norm(en) oder
normativen Dokument(en) übereinstimmt:

Technische Vorschriften: 73/23/CEE, DIN EN 60204-1, 89/392/CEE

Regensburg, den 02.05.2018

Unterschrift